

HILARY® direkt Schwangerschaftstest

Gebrauchsinformation

Einfach in der Anwendung, schnell und sicher im Ergebnis

Mit Hilary® direkt kann schon am ersten Tag nach Ausbleiben der Regel das Schwangerschaftshormon hCG, das eine Schwangerschaft anzeigt, festgestellt werden. Der Test kann zu jeder Tageszeit angewendet werden. Das Testergebnis liegt bereits nach 3 – 5 Minuten vor.

Der Test ist ganz einfach durchzuführen:

Abb. 1

Testheftchen aus dem Beutel entnehmen. Das Päckchen im Beutel enthält Trockenmittel. Es wird beim Test nicht benötigt.

Abb. 2

Falten Sie das Heftchen auf, klappen Sie das Deckblatt ganz nach hinten und stecken Sie es mit der Lasche fest, wie abgebildet.

Abb. 3

Halten Sie die Spitze des Tests ca. 10 Sek. in den vollen Urinstrahl.

Oder:

Sie können auch den Urin in einem sauberen Becher auffangen. Tauchen Sie die Spitze des Tests 15 – 20 Sekunden in die Urinprobe.

Abb. 4

Legen Sie den offenen Test mit der Beschriftung nach oben auf eine abwaschbare Unterlage.

Nach 3 – 5 Minuten können Sie das Ergebnis ablesen.

Ergebnis:

Eine rote Linie im Ergebnisfenster (= Kontrolllinie): nicht schwanger.

Setzt die Regel in den nächsten Tagen nicht ein, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Zwei rote Linien im Ergebnisfenster: schwanger.

Die beiden Linien können unterschiedlich stark gefärbt sein, von rot bis schwach rosa, und sie können unterschiedlich breit sein. Diese Reaktion ist normal.

Bei einem schwach rosa Ergebnisstreifen nach 5 Minuten sollte der Test nach weiteren 5 Minuten nochmals abgelesen werden, da sich in dieser Zeit der Streifen noch kräftiger färben kann. Zeigt der Test an, dass Sie schwanger sind, wenden Sie sich an Ihren Arzt, um mit ihm die für den Verlauf der Schwangerschaft sinnvollen Maßnahmen zu besprechen.

Wissenswertes zu Hilary® direkt

Wie funktioniert Hilary® direkt?

Hilary® direkt ist ein Urin-Test, der das Schwangerschaftshormon hCG im Urin nachweist. Nach Eintreten einer Schwangerschaft wird das Hormon vom Körper produziert und ist nach einigen Tagen im Urin nachweisbar. Mit Hilary® direkt kann das Hormon schon am ersten Tag nach Ausbleiben der Regel bestimmt werden.

Ab welchem Zeitpunkt kann Hilary® direkt verwendet werden?

Hilary® direkt kann bereits am ersten Tag nach Ausbleiben der Regel angewendet werden.

Muss Morgenurin verwendet werden?

Nein, Hilary® direkt kann zu jeder Tageszeit angewendet werden.

Wie sicher ist Hilary® direkt?

Bei korrekter Durchführung ist die Zuverlässigkeit des Schwangerschaftstests mit der von Labortests vergleichbar.

Welche Bedeutung hat die Kontrolllinie?

Die Kontrolllinie zeigt an, dass genügend Urin aufgenommen wurde und der Test richtig funktioniert. Zeigt sich keine Linie, sollten Sie einen neuen Test durchführen.

Können Medikamente oder Alkohol das Ergebnis beeinflussen?

Nur wenige Medikamente, nämlich solche, die das Hormon hCG enthalten, können das Ergebnis beeinflussen. Andere Arzneimittel, z. B. Schmerzmittel, Antibiotika, die „Pille“ oder Alkohol haben im allgemeinen keinen Einfluss auf das Testergebnis.

Was tue ich, wenn das Ergebnis anzeigt, dass ich nicht schwanger bin, aber die Regel dennoch ausbleibt?

Setzt die Regel nicht innerhalb einer Woche ein, könnte es sein, dass Sie den Fälligkeitstag der Blutung falsch bestimmt haben. In diesem Fall führen Sie einen neuen Test durch. Ist dieser ebenfalls negativ und die Regel bleibt aus, sollten Sie sich an Ihren Arzt wenden.

Haben Sie noch Fragen, Anregungen oder wünschen Sie nähere Informationen, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.

Beratungs-Service: 02241/317-0

Telefax: 02241/317390

Technische Daten:

Hilary® direkt Schwangerschaftstest

Wirksame Bestandteile: monoklonale Antikörper (Maus) gegen hCG

Untersuchungsmaterial: Urin, keine Vorbehandlung, keine Aufbewahrung

- Nachweismethode: Hilary® direkt ist ein Schnelltest zur Eigenanwendung, der immunochromatographisch das Schwangerschaftshormon hCG nachweist. (Immunchromatographie: spezielle Methode zum Nachweis von Hormonen).
- Leistungsmerkmale: Untere Nachweisgrenze: 25 mIU hCG/ml
(Messbereich: 20 mIU hCG/ml –600 IU hCG/ml)
Diagnostische Sensitivität: 100 %
Diagnostische Spezifität: 100 %
- Aufbewahrung: In Originalverpackung bei Zimmertemperatur. Nach Öffnen des Verpackungsbeutels sollte der Test sofort durchgeführt werden.
- Hinweise: **!** Gebrauchsinformation sorgfältig durchlesen.
Test nicht benutzen, wenn Verpackungsbeutel beschädigt ist.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
Benutzten Test mit Hausabfall entsorgen.

Dolorgiet Arzneimittel
Otto-von-Guericke-Str. 1
53754 St. Augustin/Bonn

Stand der Information: April 2002

⌘

Hilary® direkt Abrufcoupon

Bitte senden Sie mir zu (Entsprechendes bitte ankreuzen):

- Zykluskalender** **Hilary® direkt Infobroschüre**

Adresse:

Name, Vorname: -----

Straße, Haus-Nr.: -----

PLZ, Ort: -----

Alter: -----

Bitte senden Sie den Coupon an:

Dolorgiet Arzneimittel, Produktmanagement Hilary® direkt
Otto-von-Guericke-Str. 1, 53754 St. Augustin